

ADD.ONE SKIN

Gebrauchsanweisung/Anwendungshinweise für die Wundspülung bei Tier und Mensch

ADD.ONE SKIN wird verwendet zur Spülung offener Wunden bei Tieren und Menschen.

Unter dem Begriff Wunden sind alle Arten von Wunden zusammengefasst. Dies sind Schürfwunden, offene Schnittwunden, Dekubitus und ebenfalls intraoperative Wunden.

Bei heilenden Wunden kann durch die Spülung abgestorbenes Gewebe entfernt und so die Heilung unterstützt werden.

Gebrauchsanweisung

ADD.ONE SKIN wird als fertige Lösung eingesetzt.

Die Wunde nicht nur einsprühen, sondern ergiebig spülen, um abgestorbene Gewebeteile und Schmutz zu entfernen. Eine Einwirkzeit von ca. 30 Sekunden genügt. Gegebenenfalls kann mit einem Einmaltuch aus Papier die Fläche trockengetupft oder abgetrocknet werden.

Die Wundspülung mehrmals täglich wiederholen. Ist die Wunde bereits am abheilen und trocken, kann auf einen Verband verzichtet werden, aber es sollte weiter leicht gespült werden, bis der Schorf sich löst.

ADD.ONE SKIN ist kein Gefahrstoff gemäß Europäischer Verordnung Nr. 1272/2008/EG.

Flüssigkeitsreste sind in der Kanalisation zu entsorgen, der Behälter ist der örtlichen Wertstoffsammlung gemäß den örtlichen Vorschriften zuzuführen.

Zusammensetzung des Desinfektionsmittels **ADD.ONE SKIN**:

Gemisch aus aktivem Chlor, Kochsalz und Wasser

Stoffname: Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure

Biocid Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.